



ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO RECEPTOR

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO RECEPTOR

Se uma atualização de firmware estiver disponível:

O botão de atualização será exibido.-





Para atualizar o firmware do receptor, clique no botão  ou selecione 'Firmware Update' no menu 'Receiver'.- A mensagem aparecerá conforme abaixo. Clique em 'Yes'.




ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO RECEPTOR

Clique em “Yes” para início de atualização

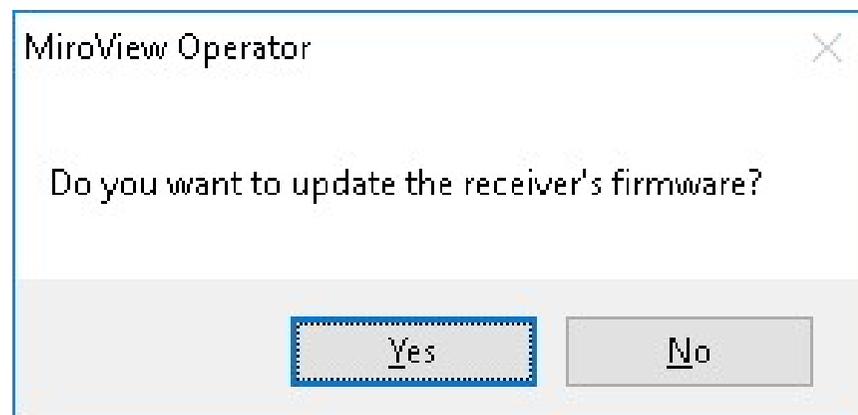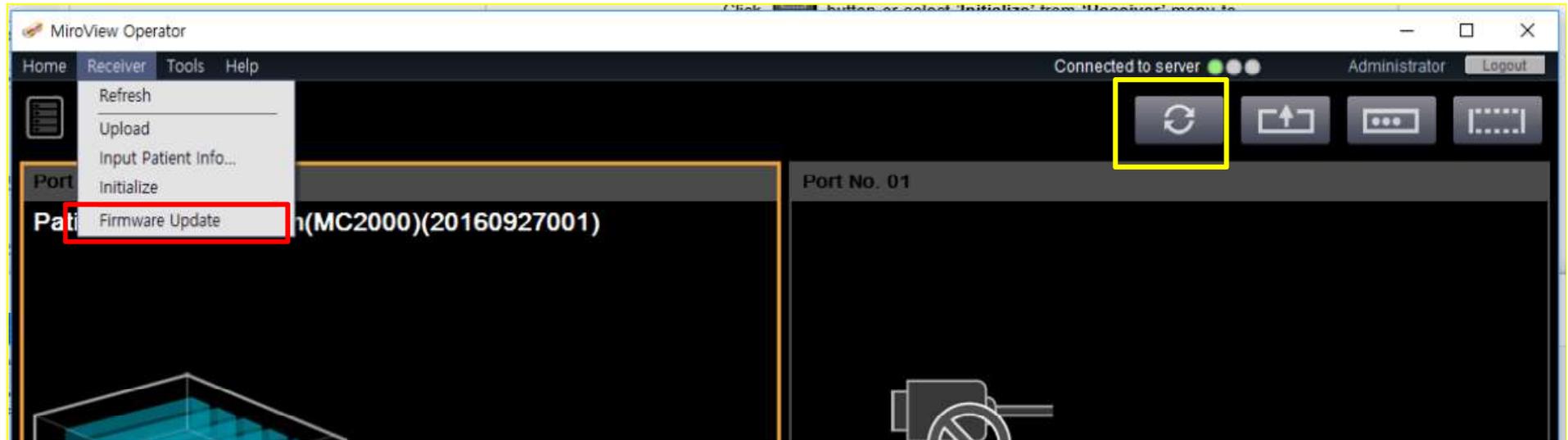

Atenção: Sua conexão Internet deve ser estável

A mensagem aparecerá como abaixo assim que a atualização for concluída e o receptor será desligado automaticamente.

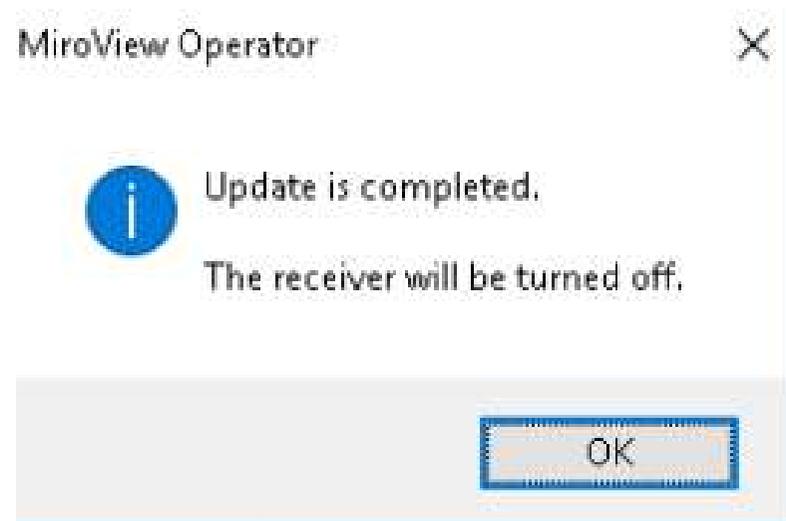

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE DO RECEPTOR

Reinicie o receptor para ativar o firmware atualizado

