

# MiroView Guia de Instalação

# MiroView Guia de Instalação

## Instruções para Instalação



1. Antes da Instalação
2. Instalação do Miroview
3. Comentários Adicionais


# Antes de Instalar

1. Faça login como administrador do computador
2. Baixe a versão mais recente do MiroView
3. Instale (execute) o software como administrador (clique com o botão direito do mouse -> executar como administrador)


# MiroView 4.0 – Instalação

1. Aceite os termos do contrato de licença e clique em Avançar;
2. Escolha o tipo de configuração;
3. Completa: instalação completa do software MiroView em um sistema;
4. Personalizado: instalação opcional do MiroViewServer, MiroViewOperator e MiroViewClient em computadores separados.

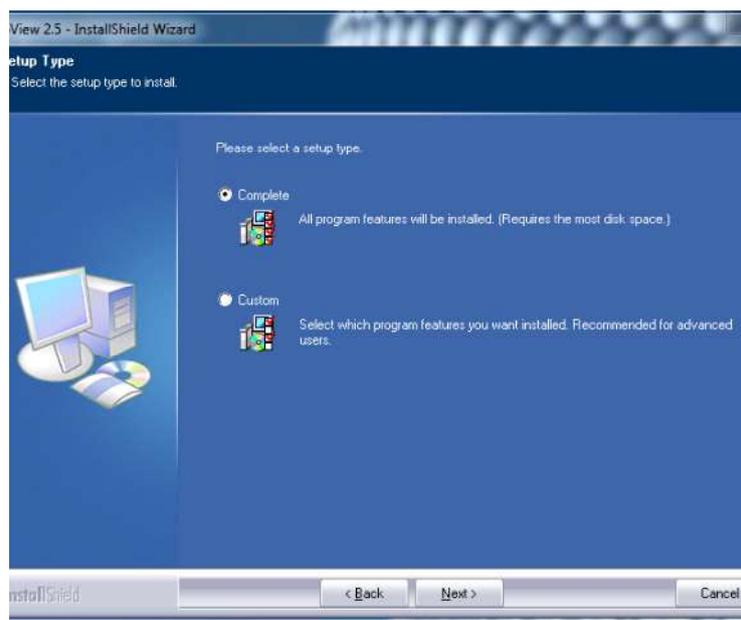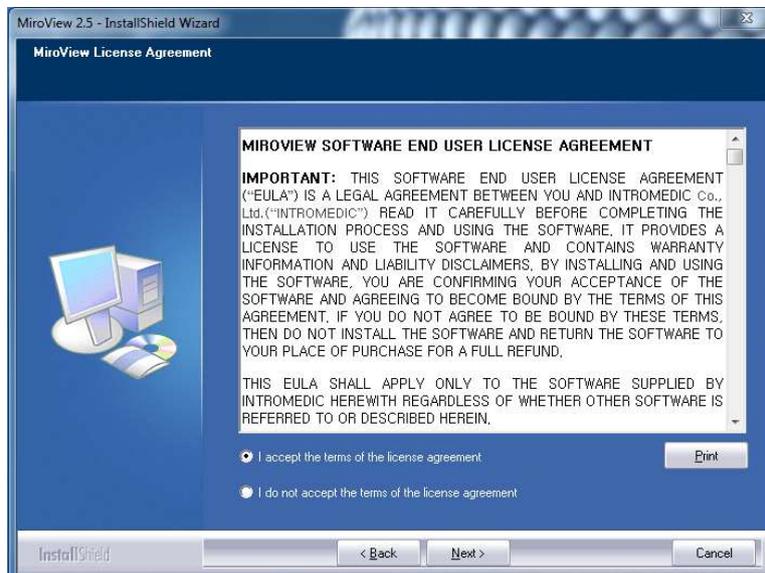

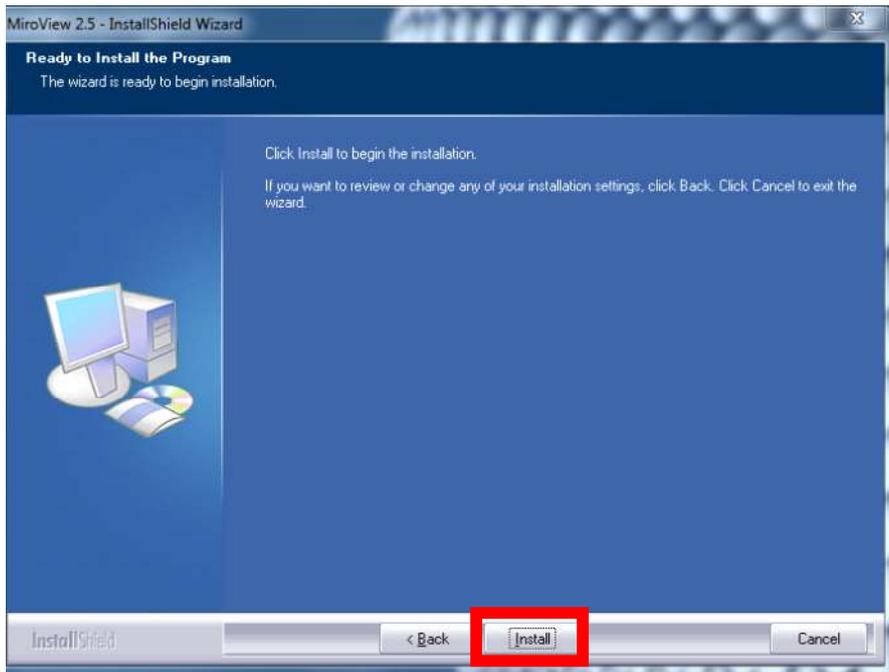


1. Clique em “Install”

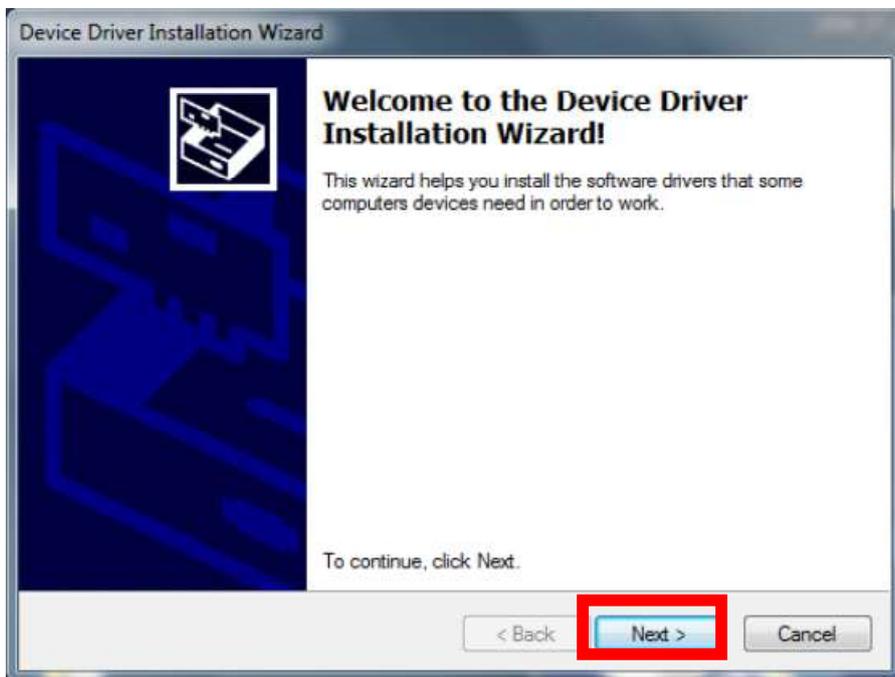

2. Clique em “Next” para instalar o Driver para Receptor

## MiroView 4.0 – Instalação

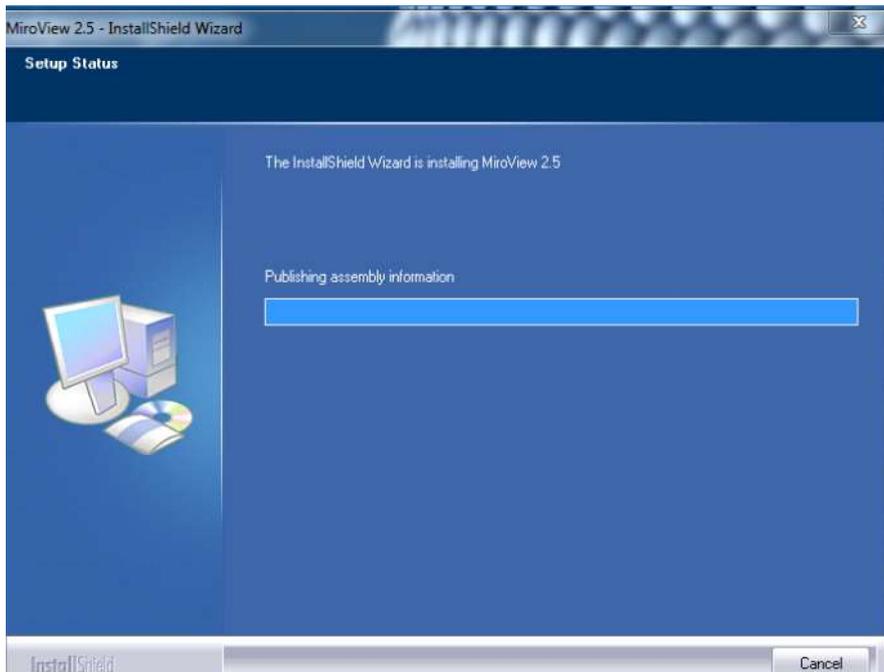


3. Clique em “Finish” para concluir a instalação

## Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Server



Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

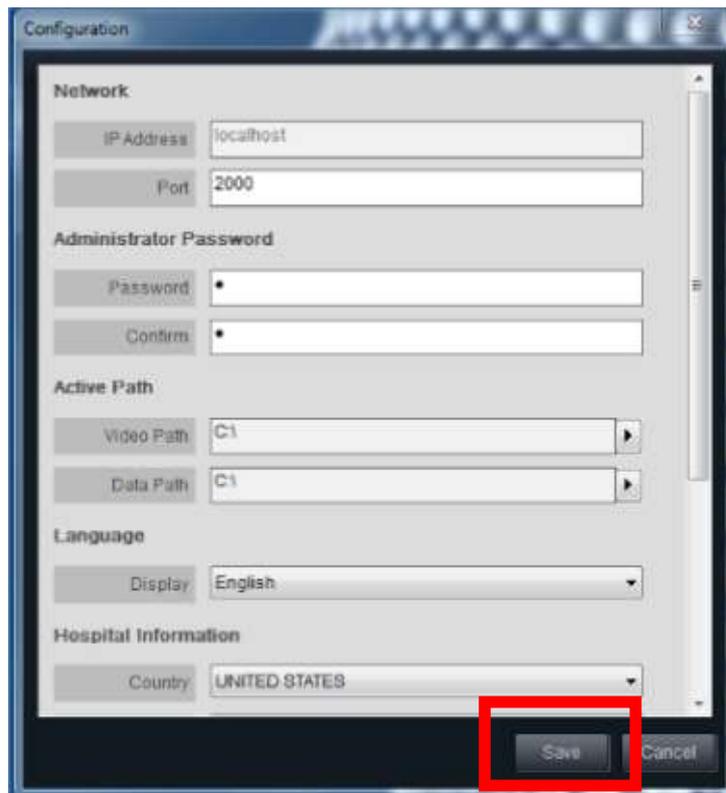
A screenshot of the MiroView Configuration dialog box. The dialog has a title bar 'Configuration' and a close button. It contains several sections: 'Network' with 'IP Address' (localhost) and 'Port' (2000); 'Administrator Password' with 'Password' and 'Confirm' fields; 'Active Path' with 'Video Path' and 'Data Path' (both C:\); 'Language' with 'Display' (English); and 'Hospital Information' with 'Country' (UNITED STATES). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons, with the 'Save' button highlighted by a red rectangle.

- Configure a senha (geralmente "1")
- Configure o disco de armazenamento de dados em Caminho Ativo (driver de armazenamento)
  - Pressione Salvar
- O servidor será reiniciado

## Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Operador



Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

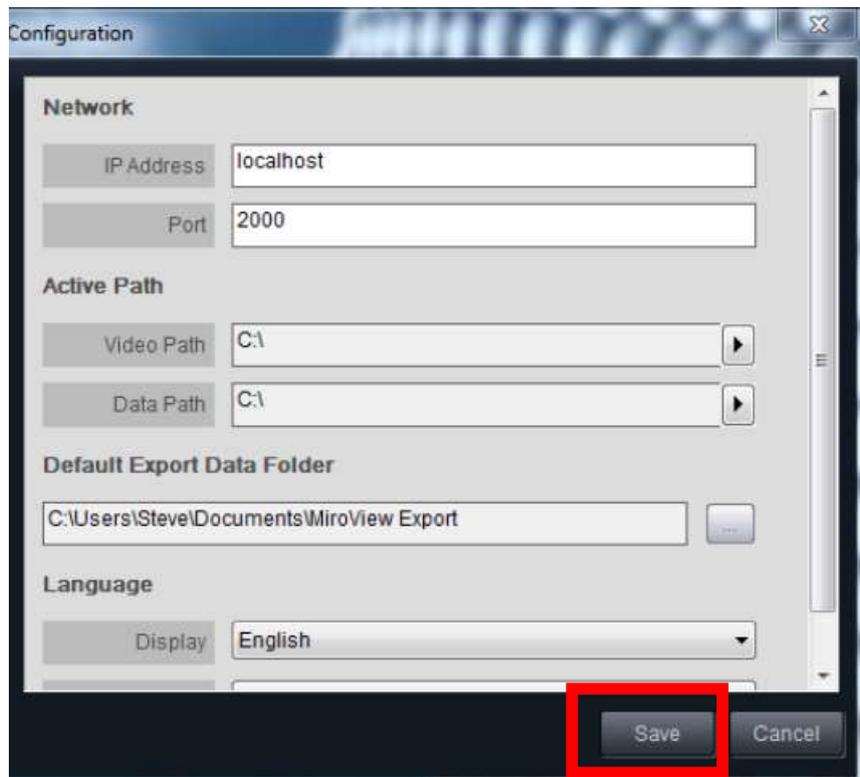


- Verifique o caminho de vídeo e de dados
- Eles devem estar definidos exatamente como o MiroView Server
  - Clique em Salvar
  - O MiroView-Operator será reiniciado

## Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Cliente




Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

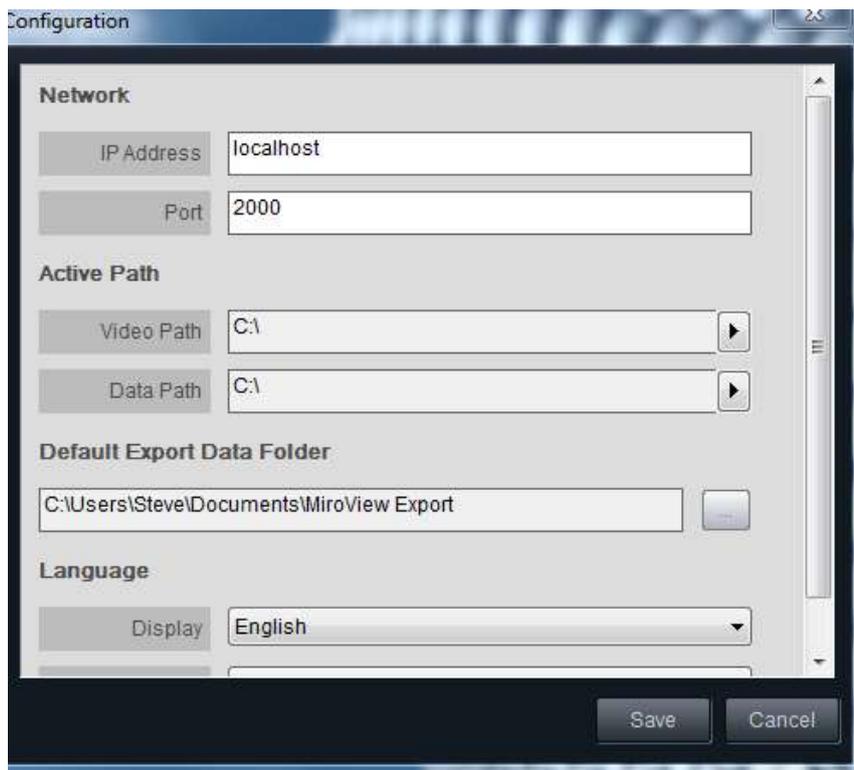

- Verifique o caminho de vídeo e de dados
- Eles devem estar definidos exatamente como o MiroView Server
  - Clique em Salvar
  - O MiroView Client será reiniciado

## Atualização do firmware do receptor

1. Conecte o Receptor ao PC
2. Abra o MiroView Operator
3. Se houver uma nova atualização de versão de firmware, você verá o ícone de atualização de firmware à esquerda do botão de upload (consulte o imagem abaixo)
4. Pressione o botão do firmware e reinicie o receptor após terminar

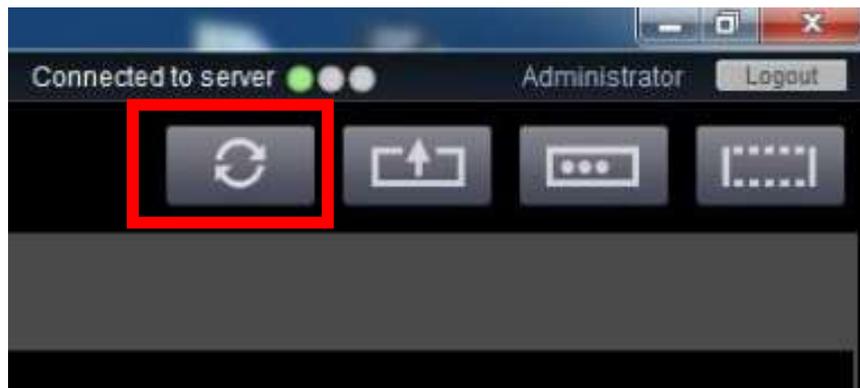

## Comentários Adicionais

- Recomendamos que sejam feitos backups regulares e mantendo os arquivos de pacientes em pelo menos duas unidades de disco separadas. Por exemplo, o PC onde o MiroView está instalado e um disco rígido externo, driver ou qualquer outro meio ocmptável;
- Recomendamos também atualizar regularmente o MiroView para a versão disponível mais recente ;
- O MiroView é compatível com MR1100 e MR2000, mas foi projetado especialmente para MR2000. No entanto, não há problema se o cliente usar o receptor MR1100.

# OBRIGADO!

[sac@endosolutions.med.br](mailto:sac@endosolutions.med.br)