

MiroView Guia de Instalação

MiroView Guia de Instalação

Instruções para Instalação


1. Antes da Instalação
2. Instalação do Miroview
3. Comentários Adicionais


Antes de Instalar

1. Faça login como administrador do computador
2. Baixe a versão mais recente do MiroView
3. Instale (execute) o software como administrador (clique com o botão direito do mouse -> executar como administrador)


MiroView 4.0 – Instalação

1. Aceite os termos do contrato de licença e clique em Avançar;
2. Escolha o tipo de configuração;
3. Completa: instalação completa do software MiroView em um sistema;
4. Personalizado: instalação opcional do MiroViewServer, MiroViewOperator e MiroViewClient em computadores separados.

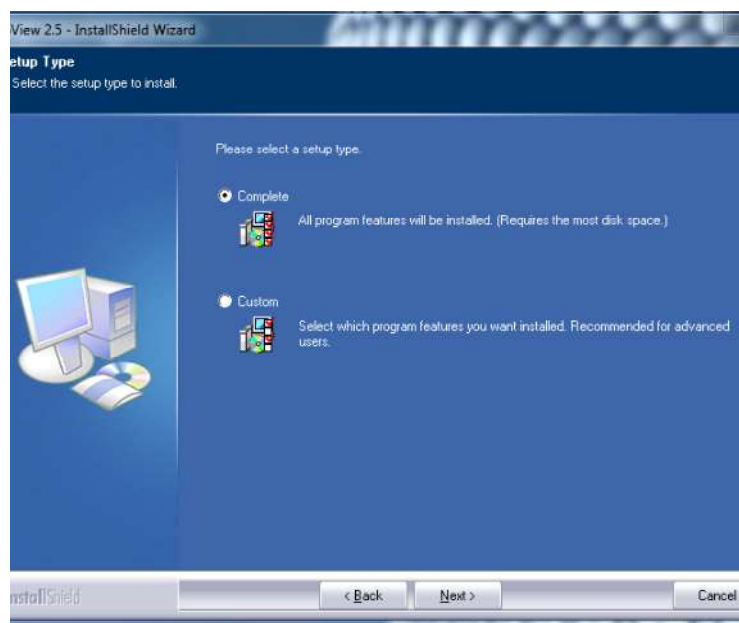


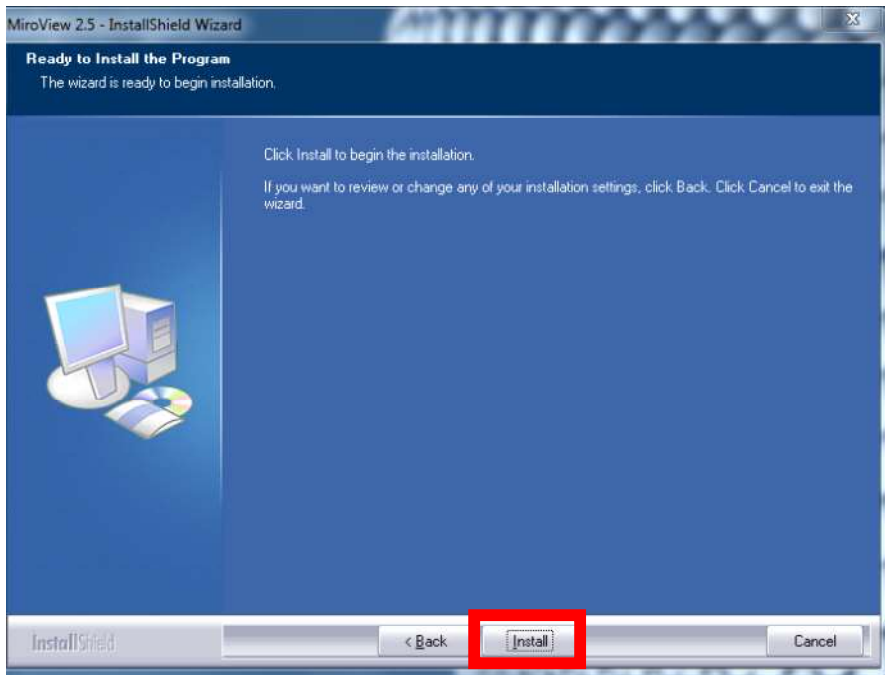


1. Clique em “Install”

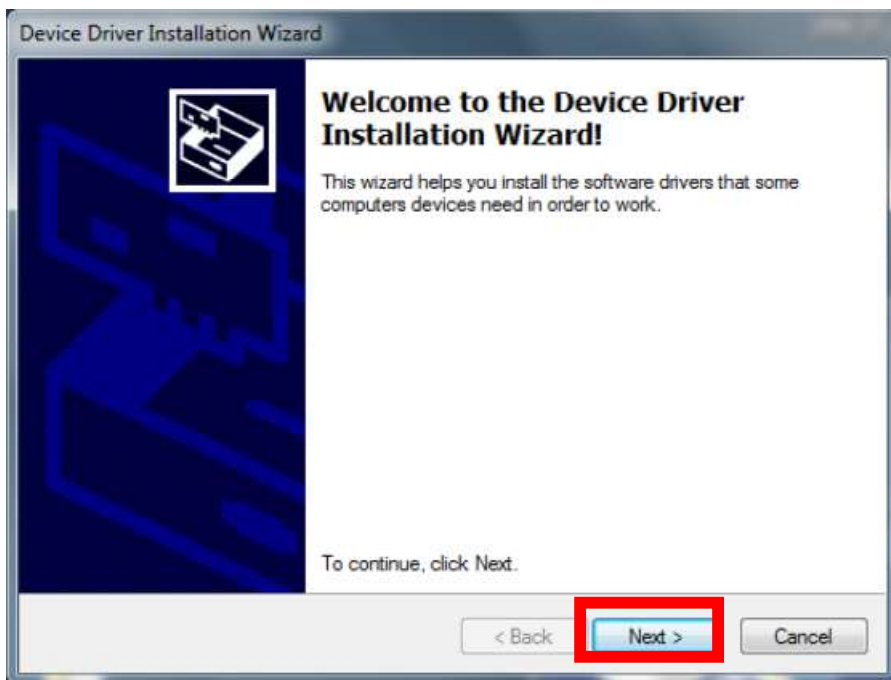

2. Clique em “Next” para instalar o Driver para Receptor

MiroView 4.0 – Instalação

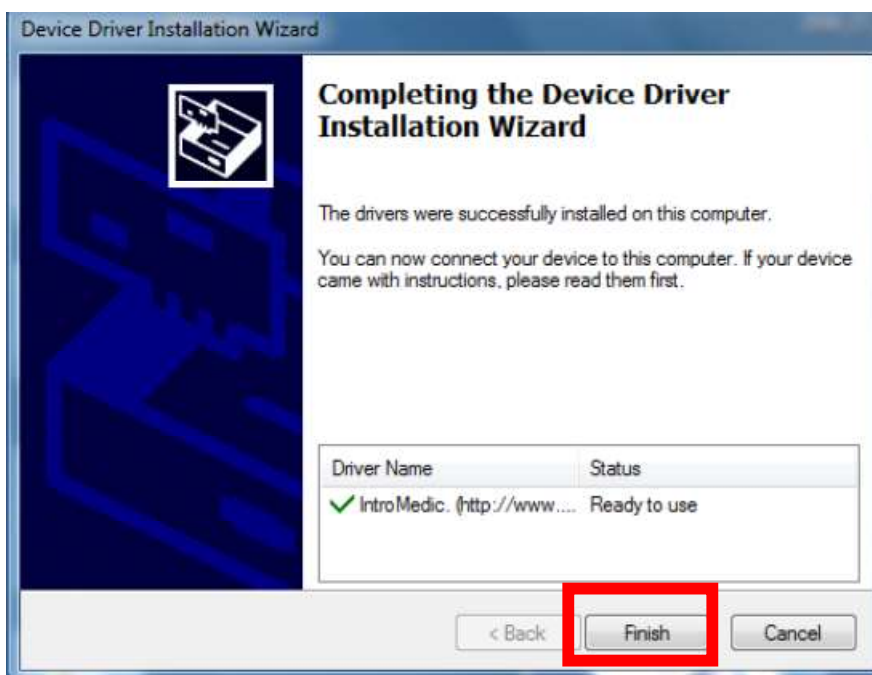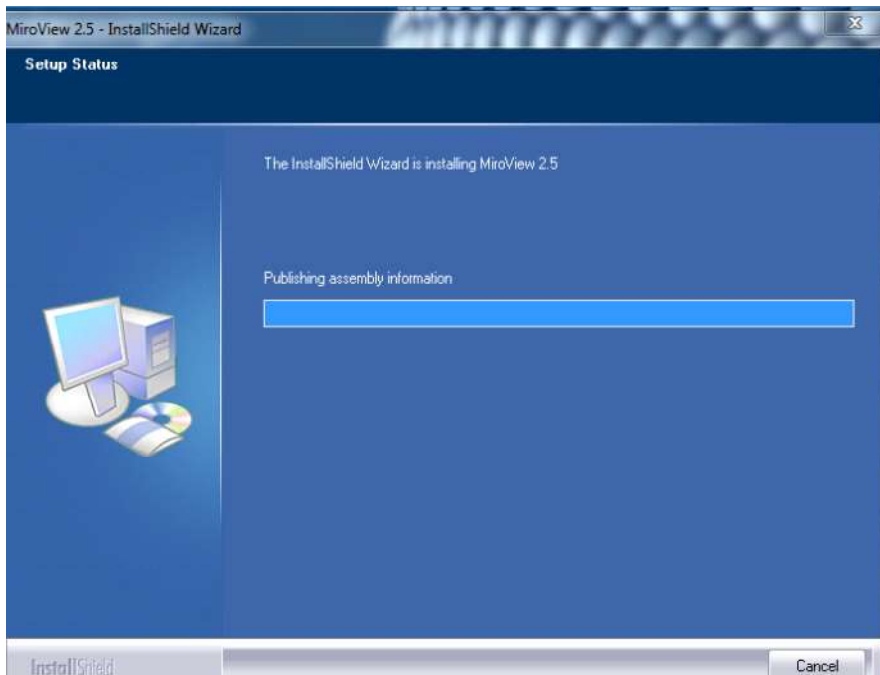


3. Clique em “Finish” para concluir a instalação

Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Server



Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

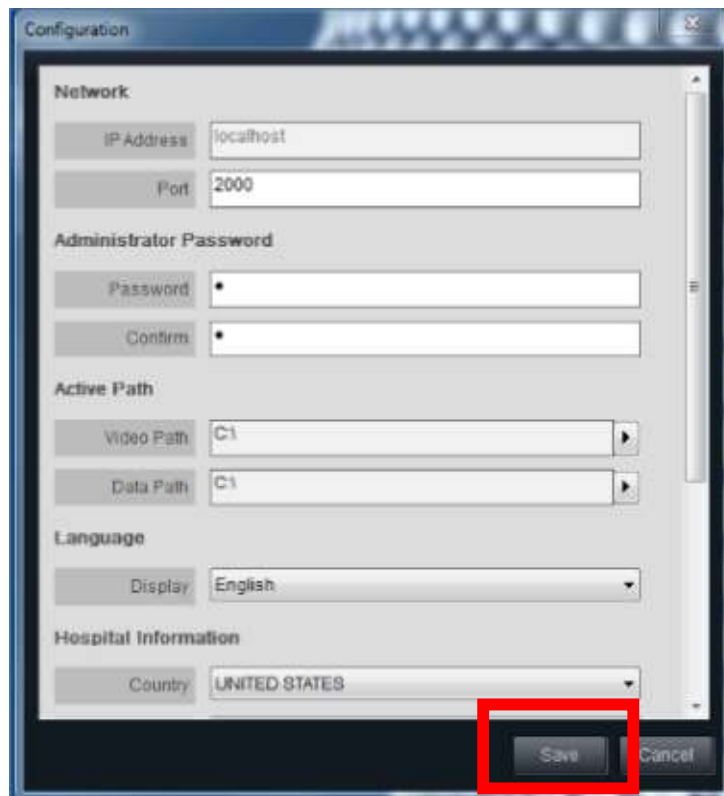
A screenshot of the MiroView Configuration dialog box. The dialog has a title bar 'Configuration' and a close button. It contains several sections: 'Network' with 'IP Address' (localhost) and 'Port' (2000); 'Administrator Password' with 'Password' and 'Confirm' fields; 'Active Path' with 'Video Path' and 'Data Path' (both C:\); 'Language' with 'Display' (English); and 'Hospital Information' with 'Country' (UNITED STATES). At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons, with the 'Save' button highlighted by a red rectangle.

- Configure a senha (geralmente “1”)
- Configure o disco de armazenamento de dados em Caminho Ativo (driver de armazenamento)
 - Pressione Salvar
- O servidor será reiniciado

Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Operador



Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

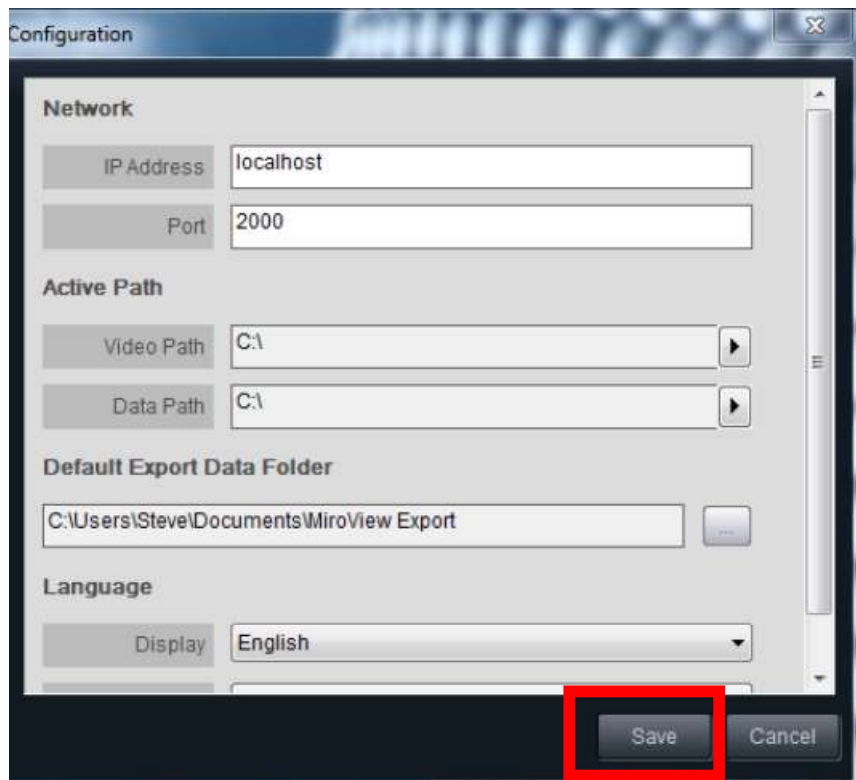


- Verifique o caminho de vídeo e de dados
- Eles devem estar definidos exatamente como o MiroView Server
 - Clique em Salvar
 - O MiroView-Operator será reiniciado

Configuração - Instalação do MiroView / MiroView Cliente




Clique duas vezes no ícone do MiroView Server na área de trabalho

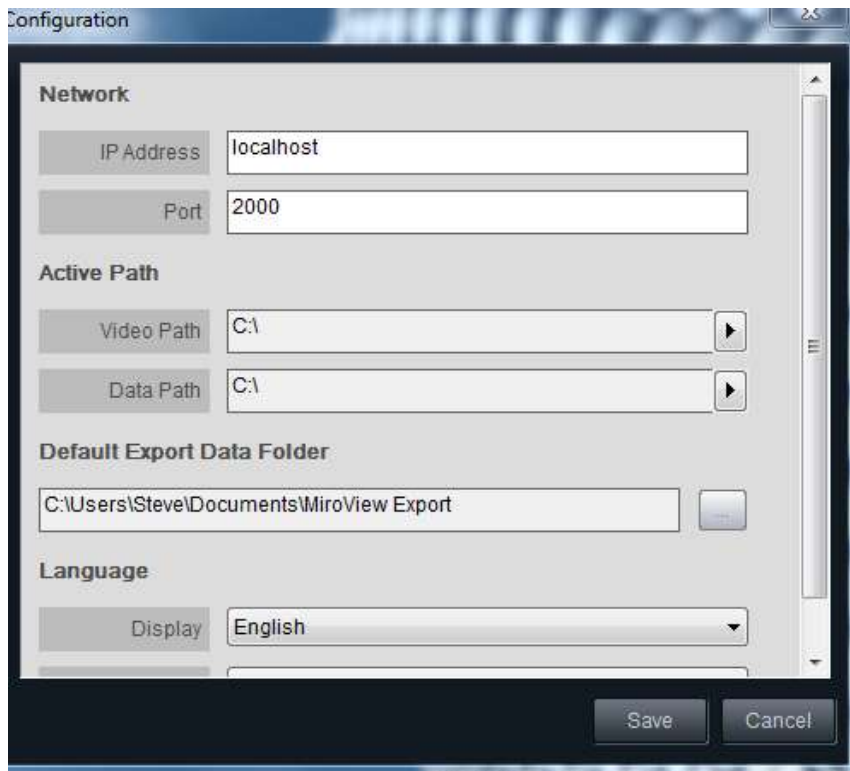

- Verifique o caminho de vídeo e de dados
- Eles devem estar definidos exatamente como o MiroView Server
 - Clique em Salvar
 - O MiroView Client será reiniciado

Atualização do firmware do receptor

1. Conecte o Receptor ao PC
2. Abra o MiroView Operator
3. Se houver uma nova atualização de versão de firmware, você verá o ícone de atualização de firmware à esquerda do botão de upload (consulte o imagem abaixo)
4. Pressione o botão do firmware e reinicie o receptor após terminar

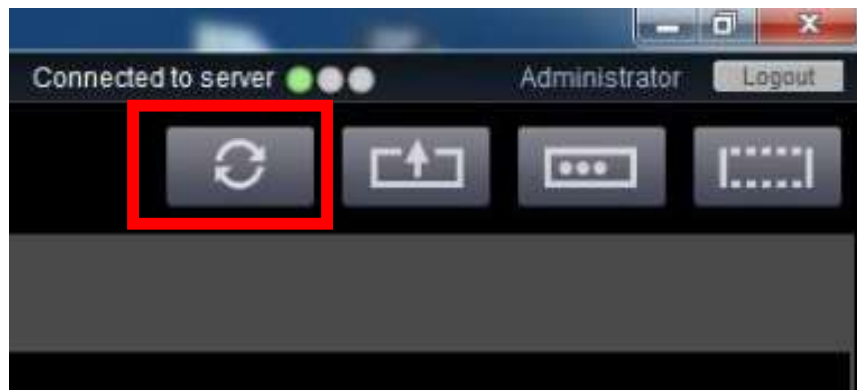

Comentários Adicionais

- Recomendamos que sejam feitos backups regulares e mantendo os arquivos de pacientes em pelo menos duas unidades de disco separadas. Por exemplo, o PC onde o MiroView está instalado e um disco rígido externo, driver ou qualquer outro meio ocmpatível;
- Recomendamos também atualizar regularmente o MiroView para a versão disponível mais recente ;
- O MiroView é compatível com MR1100 e MR2000, mas foi projetado especialmente para MR2000. No entanto, não há problema se o cliente usar o receptor MR1100.

OBRIGADO!

sac@endosolutions.med.br