



GUIA DO USUÁRIO MR2000

Índice

I. Modo de Gravação

II. Modo upload

III. Carga

I. Modo de Gravação

LIGANDO O MR 2000

Pressione o botão POWER (PWR) na lateral do receptor

Mantenha pressionado por 3 segundos



ANIMAÇÃO DO BOOT

Os leds SIG, ALM, PWR se acendem (1)

1



Depois de 10 segundos a animação inicia (2)

2



TELA INICIALIZAÇÃO

Após 3 segundos a tela INI surge

Os leds SIG e ALM se apagam

Som de inicialização é tocado



INICIANDO A ANIMAÇÃO DO “SIG”

Após 5 segundos, a animação “SIG” inicia

Nesse momento o led do “SIG” fica piscando



SINAL DE DETECÇÃO DA CÁPSULA

Após 5 segundos, a cápsula é auto-detectada e tela de REC (gravação) aparece,

Um som que a cápsula foi detectada é tocado

O led SIG mantém-se no estado “ON” (ligado)



GRAVANDO

Processo de gravação em andamento,

Se nenhum botão for pressionado durante 30 segundos, LCD será automaticamente desligado. Para ligá-lo novamente pressione o botão POWER mantendo pressionado o botão “NAVI”

Para assistir o RTV (real time viewer) pressione o botão **VOLUME**



R.T.V.

A tela do R.T.V surge

Para capturar imagem pressione a tecla
VOLUME



CAPTURA DE IMAGEM (MC 1200/1600)

A contagem de imagens capturadas se inicia e continua

O som do obturador é tocado

Para retornar a tela de REC, pressione o botão POWER



CAPTURA DE IMAGEM (MC 2000)

A tela do R.T.V surge

Para definir quais imagens a capturar de acordo com a câmera da esquerda ou direita Use o botão de NAVI

Uma vez definida qual lado para capturar a imagem pressione o botão VOLUME



RETORNANDO A GRAVAÇÃO “REC”(MC 2000)

A contagem de imagens capturadas aumenta

O som do obturador é tocado

Para retornar a tela de REC, pressione o botão POWER

PARA DESLIGAR

Pressione o botão POWER por 3 segundos

A animação de saída se inicia

O som de saída é tocado

Os leds de SIG, ALM, PWR se apagam


Após 3 segundos o MR2000 é desligado



II. Modo Upload

LIGANDO O MR 2000

Pressione o botão POWER (PWR) na lateral do receptor, mantenha pressionado por 3 segundos

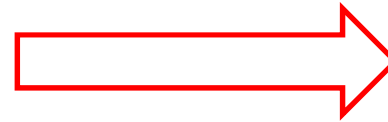

ANIMAÇÃO DO BOOT

Os leds SIG, ALM, PWR se acendem (1)

1



Depois de 10 segundos a animação inicia (2)

2



TELA DE UPLOAD

- Após 3 segundos a tela de UPLOAD surge
- Os leds de SIG, ALM se apagam
- Som de inicialização é tocado
- Para entrar no modo de Pre-Check e Selective Uploading pressione a tecla **VOLUME**



TELA DE INFORMAÇÃO DO EXAME

- As informações do exame surgem na tela
- Para ver as imagens gravadas, pressione a tecla **VOLUME**



← **VOLUME**

Receiver Status: Recorded
Capsule Product: MC2000
Recording Start: 2016.08.28 AM 11:37:16
Recording End: 2016.08.28 PM 05:13:35
Capture Count: 11
Upload Section: 00.00.00 00.06.19

IMAGENS CAPTURADAS

- As imagens capturadas são mostradas com o tempo decorrido,
- Após alguns segundos, a primeira imagem aparece e congela,
- Para continuar a ver imagens, pressione a tecla **VOLUME**



CONTINUANDO A VER IMAGENS
DEFININDO O PONTO INICIAL

- As imagens são mostradas novamente,
- O ponto inicial deve ser definido usuário,
uma vez definido a tecla **VOLUME**

Ponto de início desejado



O PONTO INICIAL

- As imagens param de ser mostradas,
- Para marcar o ponto inicial, pressione a tecla NAVI

Ponto de início desejado



O PONTO INICIAL DEFINIDO (MARCADO)


- Naquele lugar, o ponto de início é marcado (no triângulo amarelo),
- Para continuar vendo imagens pressione a tecla **VOLUME**

Ponto de início desejado



CONTINUANDO A VER IMAGENS


- As imagens começam a ser mostradas novamente,
- O ponto final deve ser definido usuário, pressionando a tecla **VOLUME**

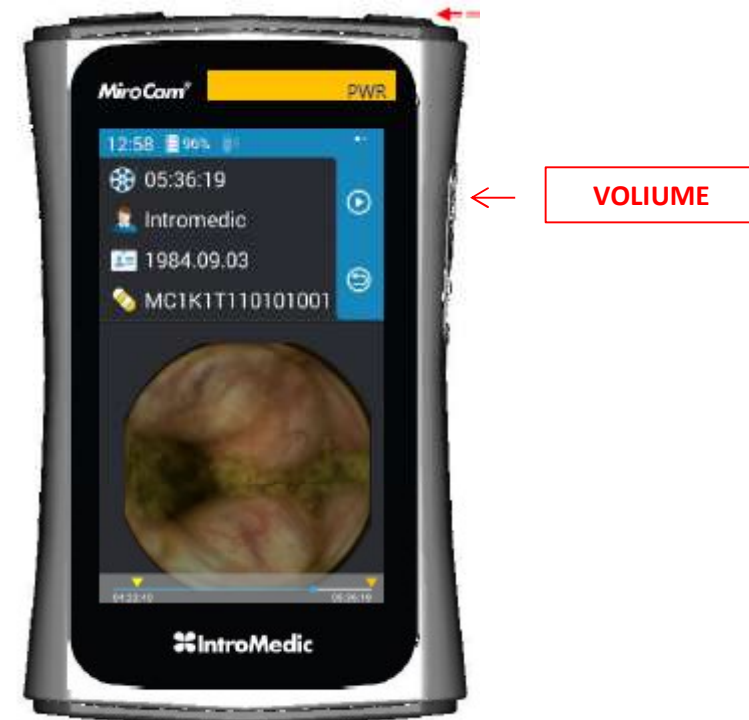

CONTINUANDO A VER IMAGENS
DEFININDO O PONTO FINAL

- As imagens param de serem mostradas,
- O ponto final deve ser definido usuário,
uma vez definido pressione a tecla NAVI

Ponto de final desejado

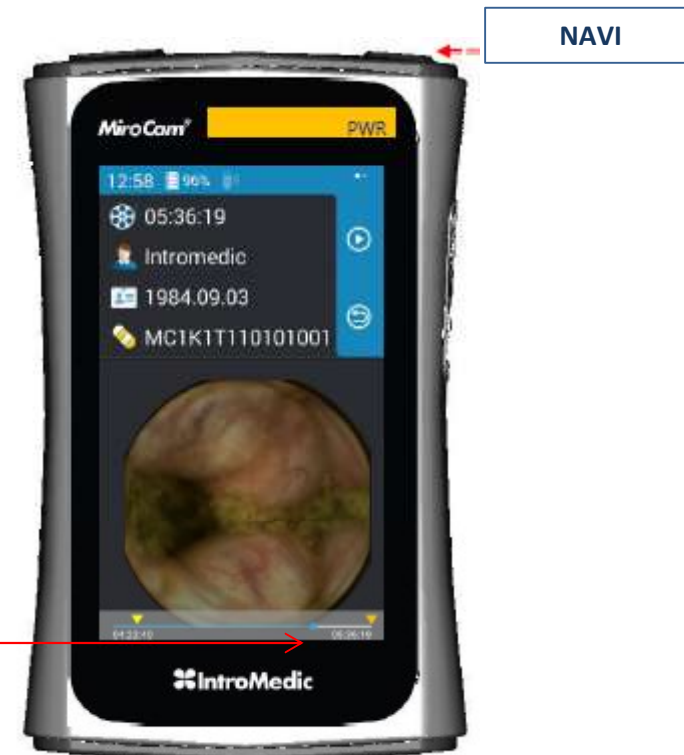

O PONTO INICIAL DEFINIDO (MARCADO)

- Naquele lugar, o ponto final é marcado (no triângulo amarelo),
- Para voltar a fazer o upload pressione a tecla PWR (Power)

Ponto final desejado



UPLOAD COMPLETO

- A tela de UPLOAD aparece
- Para conferir a seção de upload pressione a tecla **VOLUME**



VERIFICAÇÃO FINAL

- As informações do exame aparecem novamente,
- Nas informações do exame, confira a seção de upload se está corretamente definida,
- Para retornar à tela UPLOA pressione a tecla PWR



Para desligar o MR2000

- Assim que a tela do UPLOAD aparecer pressione a tecla POWER por 3 segundos
- Em seguida a tela de saída inicia uma animação
- Os leds SIG, ALM, PWR são desligados
- O som de saída é tocado
- Passados 3 (três) segundos o MR 2000 é desligado



Dicas de Navegação


- Para “resetar” a seção de upload
Pressione a tela NAVI por 3 (três) segundos quando a tela estiver pausada
- Avançar no modo rápido
Pressione e mantenha pressionada a tecla VOLUME
- Modo reverso
Pressione e mantenha pressionada a tela NAVI no modo play
- Modo reverso rápido
Pressione e mantenha pressionada a tecla VOLUME no modo reverso

III. Modo Carga

PREPARAÇÃO

Conecte a fonte de alimentação no
“charger Jack”,

Nesse momento o LED se acende com a
cor “alaranjada”

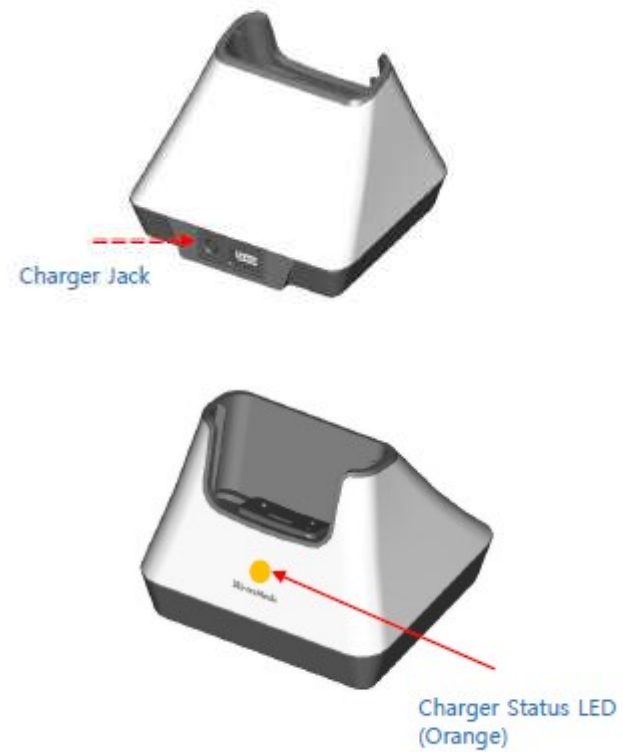

CARGA/RECARGA

Conecte o receptor MR2000 no carregador. Certifique-se que o receptor está devidamente encaixado (ouça o clique),

O receptor MR2000 deve estar desligado ao ser colocado no carregador ,

Nesse momento o LED muda para a cor “verde”,

O Led PWR começa a piscar,

Quando a carga estiver completa o Led muda para a cor azul,



Led Piscando

Para suporte técnico e-mail para

sac@endosolutions.med.br